



RECUEIL URINE : NOUVEAU DISPOSITIF : pot et tube




Recommandations d'utilisation

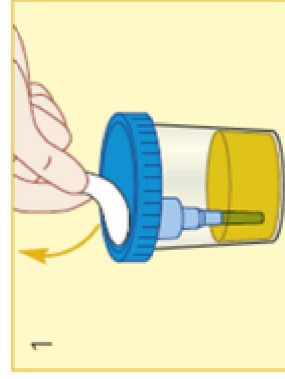


Soulevez l'étiquette blanche et collez-la au bord du couvercle.
Transférez l'urine du pot vers les tubes dans les meilleurs délais.

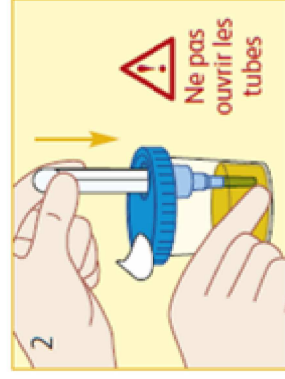


Insérez le tube en poussant à fond.
Attendez la fin du remplissage avant de retirer le tube.

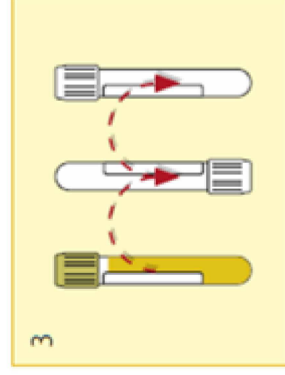


Homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).

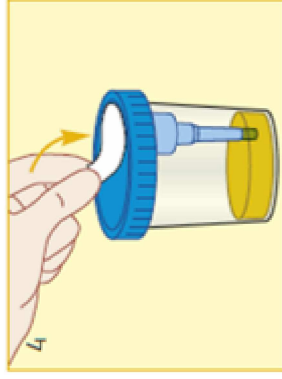


Remplacer l'étiquette sur l'orifice du couvercle

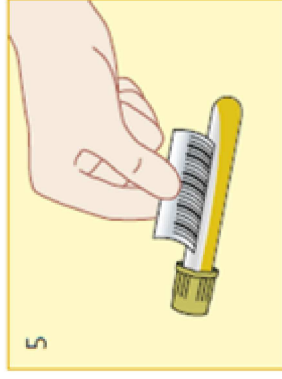


Identifiez l'échantillon.
Veuillez à coller l'étiquette de manière à laisser visible l'indicateur de niveau

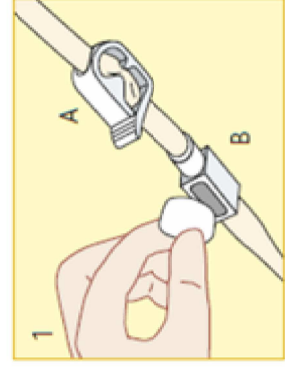


Clamppez la tubulure (A).
Vérifiez la quantité d'urine présente dans la tubulure.
Désinfectez le site de prélèvement de la sonde (B) selon le protocole recommandé.

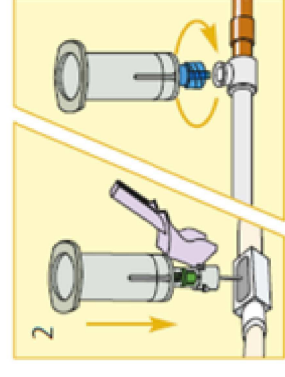


Percutez le site avec l'aiguille ou l'adaptateur (selon la nature du site).

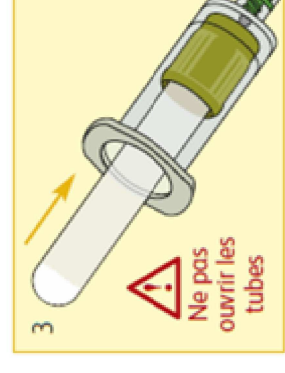


Insérez le tube et percez-le.

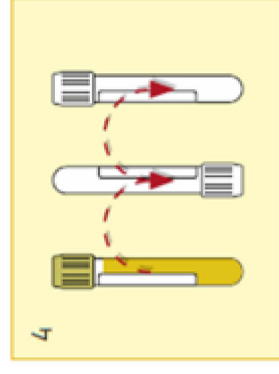

Attendez la fin du remplissage et homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).

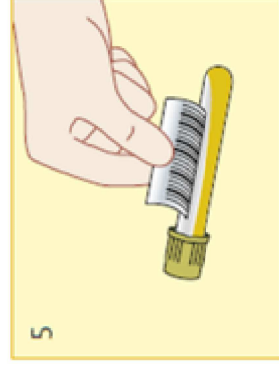

Identifiez l'échantillon et transmettez-le au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

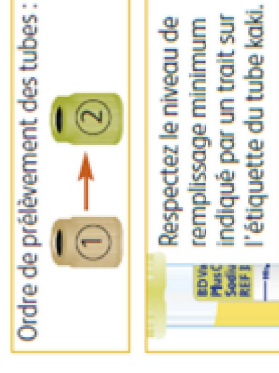

Ordre de prélèvement des tubes :

